

Sanftes Faden-Lifting  
mit natürlichem Ergebnis

The logo for 'seratea' features the brand name in a lowercase, grey, sans-serif font. A thin, curved pink line arches over the letters 'e' and 'a'. The letter 't' is a solid pink color, and a registered trademark symbol (®) is positioned to its upper right.  
seratea<sup>®</sup>  
by SERAG-WIESSNER



## So jung aussehen, wie man sich fühlt

Ab 30 beginnt die Haut sichtbar zu altern. Aber wer fühlt sich mit 35 Jahren schon alt genug für erste Fältchen? Ein Fadenlifting kann diesen Alterungsprozess zwar nicht aufhalten, jedoch um einige Jahre verlangsamen. Diese sanfte Alternative zum herkömmlichen Facelifting mit Skalpell lässt Sie auf natürliche Weise jünger aussehen. Der Schlüssel dazu ist die innovative 4D-Technologie von **seralea**<sup>®</sup>. Der traditionsreiche Nahtmaterialhersteller SERAG-WIESSNER entwickelte **seralea**<sup>®</sup> in Zusammenarbeit mit langjährigen Industriepartnern und erfahrenen Ärzten.

**seralea**<sup>®</sup> verkörpert nicht nur ein Produkt, sondern eine ganze OP-Methode zum schonenden Liften & Füllen mit Fäden.



INNOVATIV &  
SICHER




## Was ist Fadenlifting mit **seralea**® 4D-Technologie?

Durch den Alterungsprozess verliert die Haut an Kollagen und Elastin. Dies führt zu einem gealterten und müden Aussehen.

**seralea**® regt die Neuproduktion von Kollagen an und führt zu einer Glättung und Straffung der Haut. Hierbei werden die Fäden mit sehr feinen Kanülen direkt unter die Haut eingebracht – Unebenheiten werden ausgeglichen (Filling) und kleine Falten mit den **seralea**®-Widerhakenfäden gestrafft (Lifting). Der Faden löst sich nach 180 – 210 Tagen auf, die Festigung der Gewebestruktur bleibt lange darüber hinaus erhalten.

Eine regenerative Wirkung für sanfte und natürliche Ergebnisse:

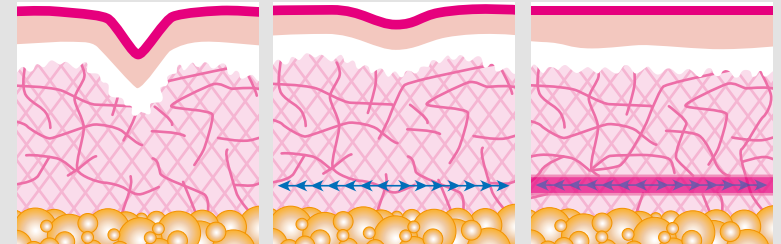

Vor der Behandlung

Am Tag der Behandlung

Nach ca. 6 – 8 Wochen

## Fäden für alle Indikationen


Die Produktlinie **seralea**® besteht aus verschiedenen Kanülen- und Fadentypen in unterschiedlichen Größen für diverse Anwendungsbereiche. Die Kanülen bestechen durch ihre extrem hohe Qualität und Verarbeitung.



Der **MONO**-Faden besteht aus einem einzigen Filament. Er induziert auf mechanische Weise als Filler eine Straffung in den tiefen Schichten des subkutanen Gewebes



Der **SCREW BASIC**-Faden glättet tiefere Unebenheiten durch seine spiralförmige, voluminösere Geometrie.

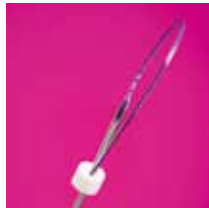

Als **BARB** werden Fäden mit Widerhaken bezeichnet, mit denen ein mechanisches Lifting ermöglicht wird.



Der **VOLUME BROOM**-Faden besteht aus mehreren dünnen Einzelfilamenten, die in einem Zug eingebracht werden, um den Filling-Effekt noch weiter zu intensivieren.



Bei den **FORTE** Fäden sind die Widerhaken am stärksten ausgeprägt mit entsprechendem Straffungseffekt und noch stärkerer Haltekraft zur Hebung des Gewebes.

## Für wen ist das Fadenlifting geeignet?

Es kommt für Patienten in Frage, bei denen ein komplexes Facelifting verfrüht wäre und die einen chirurgischen Eingriff unter Vollnarkose scheuen.

## Wie wird behandelt?

Der Eingriff kann in lokaler Anästhesie und ohne aufwendige Vorbereitung erfolgen. Je nach Einsatzbereich werden unterschiedliche Fäden verwendet. Dies wird im Vorfeld genau mit Ihnen besprochen.

## Wie lange dauert der Eingriff?

Je nachdem, welche Bereiche behandelt werden, zwischen 30 und 60 Minuten.

## Hat die Behandlung Nebenwirkungen?

Direkt nach der Behandlung kann es zu lokalen Schwellungen und vorübergehenden Schmerzen kommen, die aber durch Kühlen schnell wieder verschwinden. Ihr Arzt wird Sie über die möglichen Risiken und Nebenwirkungen genau aufklären.

## Wann sehe ich erste Ergebnisse?

Erste positive Ergebnisse sind schon direkt nach der Behandlung sichtbar (3D-Effekt). Der 4D-Effekt, also der volle Erfolg der Behandlung, zeigt sich nach 6–8 Wochen im Laufe der Fadenresorption. Das Ergebnis hält bis zu 2 Jahre. Das Verfahren ist ohne Probleme wiederholbar sowie auch mit anderen Lifting-Filling-Methoden kombinierbar. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, sollte ein Lifting mit **seralea**® 4D-Technologie nur von speziell geschulten Ärzten durchgeführt werden. Fragen Sie Ihren Arzt danach!

## Wie lange nach dem Fadenlifting falle ich aus?

Je nach Behandlungsumfang sind Sie sofort, spätestens nach 3 Tagen wieder arbeitsfähig.

## Was kostet ein Fadenlifting?

Das richtet sich ganz nach dem zu behandelnden Bereich. Bitte sprechen Sie darüber mit Ihrem Arzt.



HAUPT-  
INDIKATION

Stirn

Glabellafalten

Augenbrauen

Schläfen

Nasolabialfalten

Raucherfalten

Lippenrand

Marionettenfalten

Lippenvolumen

# Fadenlifting mit **seralea**<sup>®</sup> 4D-Technologie

Krähenfüße

Tränensäcke

Wangen

Plisseefältchen

Unterkieferlinie

Kinn

Hals

Doppelkinn





## Für welche Bereiche ist ein Fadenlifting neben dem Gesicht noch geeignet?

Prinzipiell ist Fadenlifting für alle Körperbereiche möglich, die unerwünschte Alterungserscheinungen aufweisen. Zusätzlich zum Gesichtsbereich sind dies:

- Hals und Dekolleté
- Oberarme
- Brust
- Gesäß und Oberschenkel
- wo Hyaluronsäure und Botox nicht weiterhelfen

Bei einem persönlichen Beratungsgespräch mit Ihrem Arzt erfahren Sie alles über die Möglichkeiten der Behandlung. Er wird die zu behandelnden Bereiche untersuchen und auf alle Ihre Wünsche und Fragen eingehen.



## Die Vorteile von **seralea**<sup>®</sup> Fadenlifting:

- Sofort sichtbare Ergebnisse
- Nur lokale Anästhesie
- Keine bzw. geringe Ausfallzeit
- Länger anhaltende Wirkung
- Wiederholbare Anwendung
- Kombinierbar mit oder als Vorstufe zu anderen ästhetischen Gesichtsbearbeitungen
- Verlangsamung des Alterungsprozesses und deshalb auch für jüngere Patienten geeignet (Absacken der Wangenpartie)
- Reduzierung der Falten durch Hebung und Filling







Ihr seralea®-Kompetenzpartner:

In Zusammenarbeit mit:  
Dr. med. Hermann Koebe  
KOEBE KLINIK, Meerbusch



SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG  
Zum Kugelfang 8-12  
95119 Naila

☎ 09282 937-0  
☎ 09282 937-9369

@ info@seralea.de  
🌐 www.seralea.de